

Instrukcja pobrania materiału - wymazu z błony śluzowej policzka



- 1/ założyć jednorazową rękawiczkę na prawą dłoń (w przypadku osoby leworęcznej na lewą dłoń),
 - 2/ odkręcić korek plastikowego pojemnika / osłonki / z wymazówką (opisaną jako **M** – dla matki, **Dz** – dla dziecka lub **O** – dla domniemanego ojca), wyciągnąć wymazówkę z osłonki i nie dotykając palcami końcówki z wacikiem chwycić biały patyczek wymazówki dłonią z rękawiczką w połowie odległości między wacikiem a korkiem,
 - 3/ umieścić wymazówkę (wacik) w jamie ustnej odchylając nieco policzek przy użyciu drugiej ręki,
 - 4/ przyłożyć końcówkę wymazówki z wacikiem do błony śluzowej policzka /wewnątrz jamy ustnej/,
 - 5/ przez kilkanaście sekund energicznie pocierać końcówką wymazówki z wacikiem o błonę śluzową policzka po stronie lewej a następnie po stronie prawej (dla lepszego pobrania materiału można w palcach obracać wymazówkę),
 - 6/ wymazówkę z pobranym materiałem umieścić z powrotem w plastikowej przezroczystej osłonce / pojemniku / nie zamykając korka wymazówki (należy zachować ostrożność i nie dotykać wacikiem zewnętrznej ścianki osłonki wymazówki),
- Prosimy powtórzyć powyższe czynności z drugą załączoną wymazówką /2x dla każdej osoby biorącej udział w badaniu/.***
- 7/ pozostawić otwarte plastikowe pojemniki z wymazówkami przez kilka-kilkanaście godzin w celu podsuszenia pobranego materiału,
 - 8/ po kilku-kilkunastu godzinach docisnąć korki wymazówek do osłonek zamykając szczelnie pojemniki,
 - 9/ opisać etykiety pojemników imieniem i nazwiskiem osoby, od której pobrano materiał,
 - 10/ umieścić pojemniki z pobranym materiałem w załączonej kopercie zwrotnej oraz wypełnioną i podpisaną kartę zlecenia i odesłać na adres NZOZ Meditest Diagnostyka Medyczna , ul. Bronisławy 14 D, 71-533 Szczecin priorytetową przesyłką poleconą lub przesyłką kurierską.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności z pobraniem materiału prosimy o kontakt pod nr tel. **602 64 69 42**.